


TOE F.A.S.T.[®]

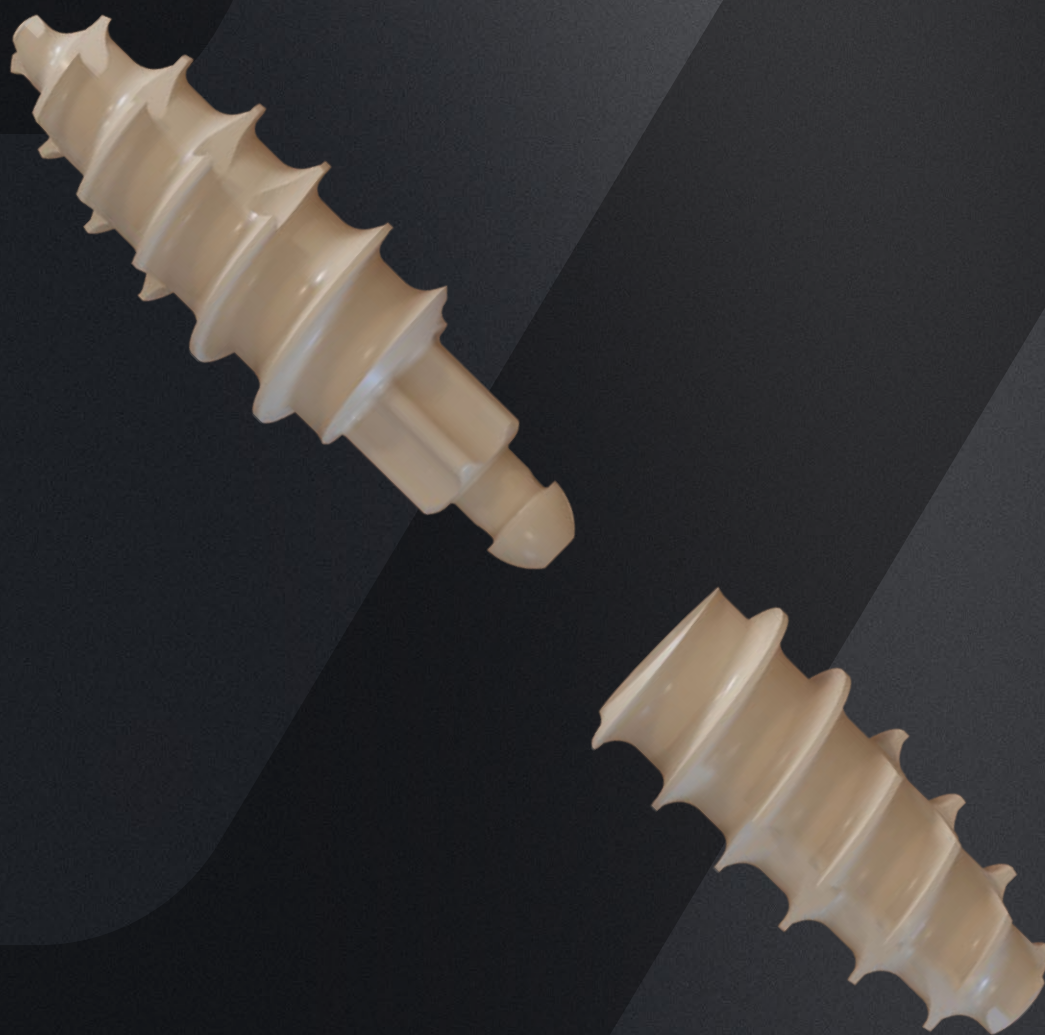

T E C H N I Q U E O P É R A T O I R E

 **serf**
EXTREMITIES



S O M M A I R E

TECHNIQUE OPÉRATOIRE.....	4
IMPLANTS & ANCILLAIRE	10
PRODUITS ASSOCIÉS	11
GAMME EXTREMITIES	12




TECHNIQUE OPÉRATOIRE

1 RÉSECTION ARTICULAIRE



Réséquer la surface articulaire de la phalange.


COUPE DROITE
PAR RAPPORT À L'AXE PHALANGIEN

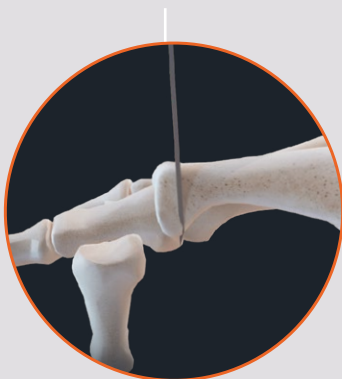

COUPE ANGULÉE
PAR RAPPORT À L'AXE PHALANGIEN




Réséction articulaire des surfaces articulaires de P2

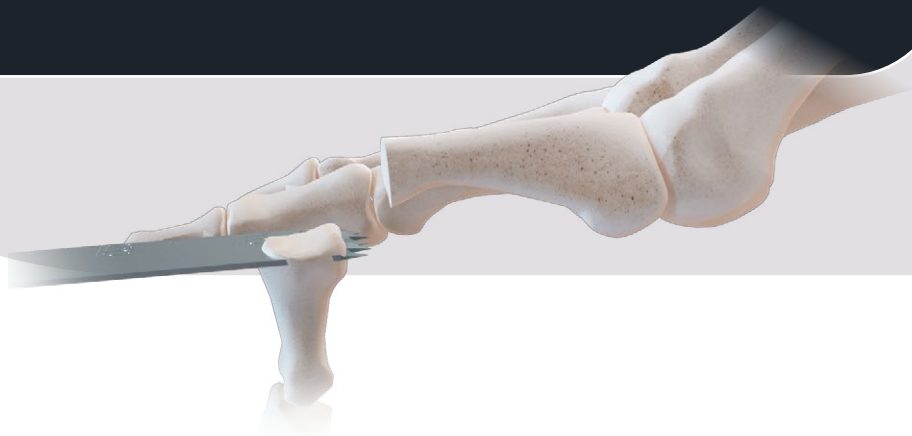


2 PRÉPARATION DE LA PHALANGE PROXIMALE

COUPE DROITE

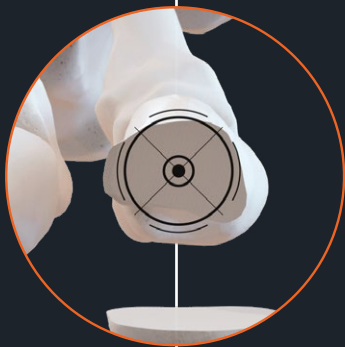

Le point d'insertion
doit être centré

COUPE ANGULÉE

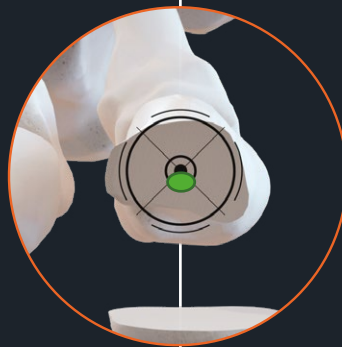


Le point d'insertion
doit être plus plantaire

Préparer le fût centro-médulaire perpendiculaire à la coupe articulaire de manière croissante à l'aide du compacteur.


La préparation doit être incrémentale en commençant par la taille S et jusqu'à la butée.

Attention : ne pas rechercher l'appui cortical, rester en spongieux.

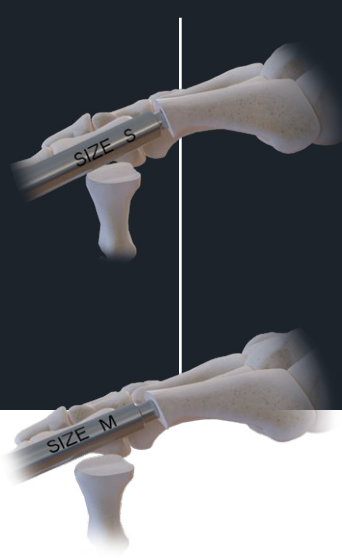

3 PRÉPARATION DE LA PHALANGE DISTALE

COUPE DROITE ET ANGULÉE

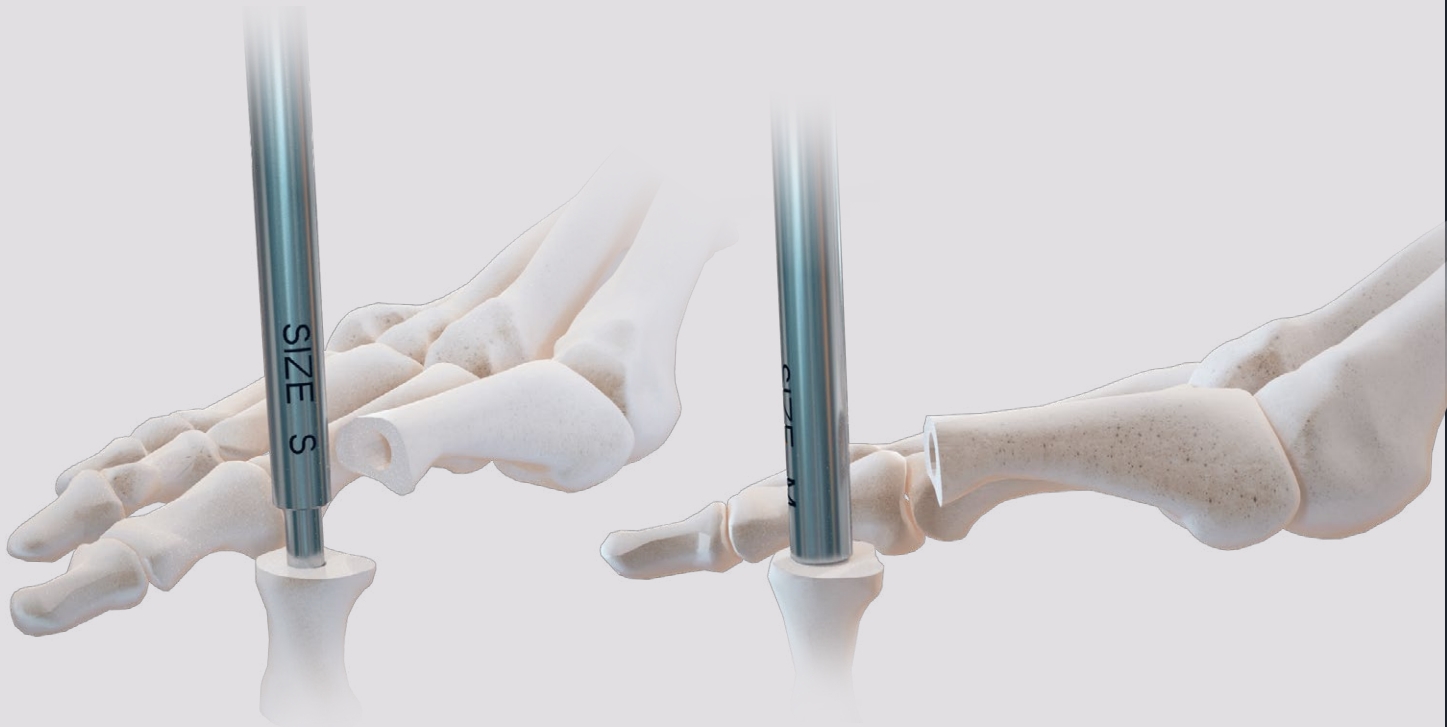

Préparer le fût centro-médulaire de manière croissante à l'aide du compacteur en commençant par la taille S et jusqu'à la butée.


4 MISE EN PLACE DES IMPLANTS

- 1 **En premier**, insérer manuellement avec le tournevis mâle l'implant femelle dans la préparation de la phalange proximale.

COUPE DROITE





COUPE ANGULÉE

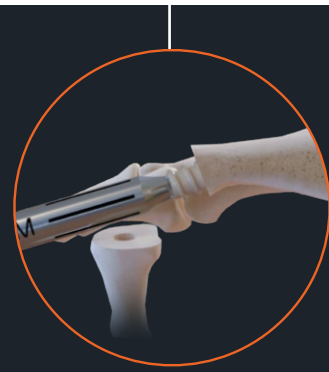

Il est important que l'implant soit bien positionné :

- ✓ L'implant est légèrement débordant
- ✗ Attention : l'implant ne doit pas être plus bas que la coupe.

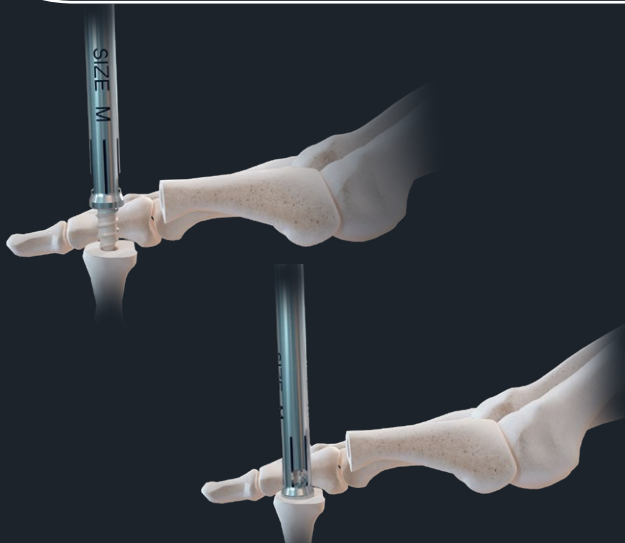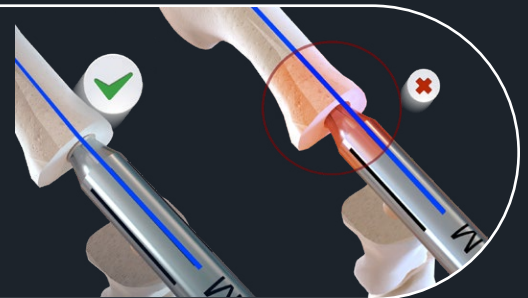

- 2 **Dans un second temps**, insérer manuellement avec le tournevis femelle, l'implant mâle dans la préparation de phalange distale.
- 3 Stopper le vissage lorsque le tournevis est en contact avec la coupe. Positionner l'un des repères du tournevis soit vertical ou horizontal.

5 RÉDUCTION DE LA PHALANGE DISTALE

COUPE DROITE ET ANGULÉE



1 Il est très important que les empreintes des pièces mâles et femelles soient alignées.



2 Rechausser la phalange distale sur la phalange proximale, jusqu'à entendre le click.
Si le clippage ne se fait pas, dévisser légèrement la pièce proximale.





Il est fortement recommandé de réaliser une ténotomie de l'extenseur.

6 OPTION : OSTÉOTOMIE BASALE PLANTAIRE PERCUTANÉE



Si l'orteil est en erectus, il est possible de réaliser une ostéotomie basale plantaire percutanée afin de pouvoir mieux régler l'appui pulpaire.

IMPLANTS & ANCILLAIRE

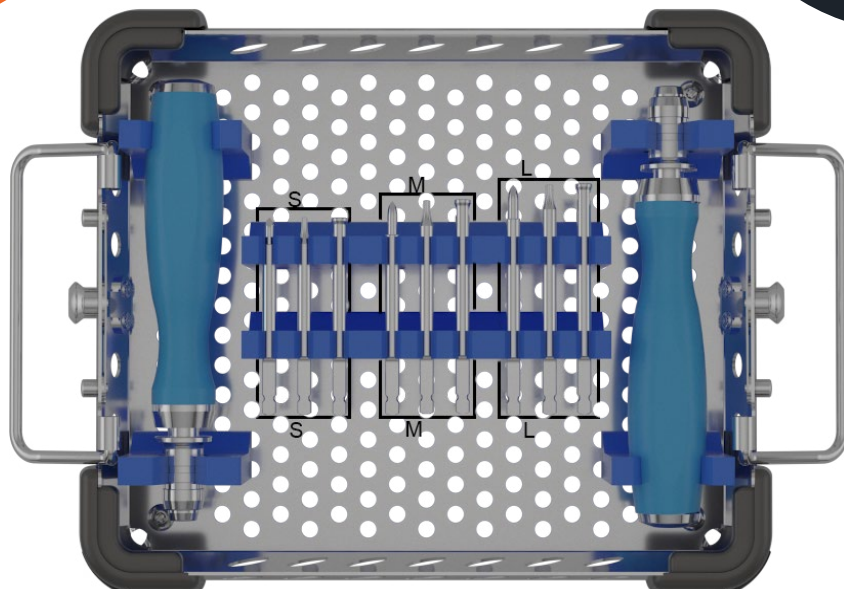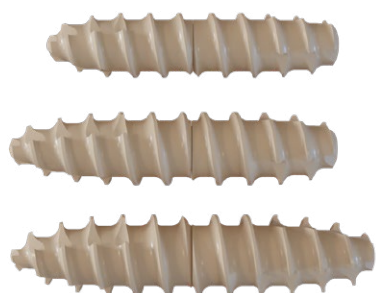

IMPLANTS

GS1	LIBELLÉ
3663165004817	Toe F.A.S.T.® Taille S
3663165004824	Toe F.A.S.T.® Taille M
3663165004831	Toe F.A.S.T.® Taille L

KIT TOE F.A.S.T.® VASETFM

GS1	LIBELLÉ
3663165004930	Panier Toe F.A.S.T.®
3663165004947	Couvercle Toe F.A.S.T.®
3663165004848	Tournevis Mâle Taille S
3663165004855	Tournevis Mâle Taille M
3663165004862	Tournevis Mâle Taille L
3663165004879	Tournevis Femelle Taille S
3663165004886	Tournevis Femelle Taille M
3663165004893	Tournevis Femelle Taille L
3663165004909	Compacteur Taille S
3663165004916	Compacteur Taille M
3663165004923	Compacteur Taille L
3663165003490	Poignée Encliquetage AO

PRODUITS ASSOCIÉS

Ø 2.7

GS1

LIBELLÉ

COMPRESSION

FAST Ø 2.7 L12	3663165003728
FAST Ø 2.7 L14	3663165002165
FAST Ø 2.7 L16	3663165002172
FAST Ø 2.7 L18	3663165002189
FAST Ø 2.7 L20	3663165002196
FAST Ø 2.7 L22	3663165002202
FAST Ø 2.7 L24	3663165002219
FAST Ø 2.7 L26	3663165002226
FAST Ø 2.7 L28	3663165002233
FAST Ø 2.7 L30	3663165002240

BISEAUTÉE

FAST Ø 2.7 L14	3663165002257
FAST Ø 2.7 L16	3663165002264
FAST Ø 2.7 L18	3663165002271
FAST Ø 2.7 L20	3663165002288
FAST Ø 2.7 L22	3663165002295
FAST Ø 2.7 L24	3663165002301
FAST Ø 2.7 L26	3663165002318
FAST Ø 2.7 L28	3663165002325
FAST Ø 2.7 L30	3663165002332
FAST Ø 2.7 L32	3663165002349
FAST Ø 2.7 L34	3663165002356
FAST Ø 2.7 L36	3663165002363
FAST Ø 2.7 L38	3663165002370
FAST Ø 2.7 L40	3663165002387

Ø 3.2

GS1

LIBELLÉ



COMPRESSION

FAST Ø 3.2 L14	3663165002486
FAST Ø 3.2 L16	3663165002493
FAST Ø 3.2 L18	3663165002509
FAST Ø 3.2 L20	3663165002516
FAST Ø 3.2 L22	3663165002523
FAST Ø 3.2 L24	3663165002530
FAST Ø 3.2 L26	3663165002547
FAST Ø 3.2 L28	3663165002554
FAST Ø 3.2 L30	3663165002561
FAST Ø 3.2 L32	3663165002578
FAST Ø 3.2 L34	3663165002585
FAST Ø 3.2 L36	3663165002592
FAST Ø 3.2 L38	3663165002608
FAST Ø 3.2 L40	3663165002615



BISEAUTÉE

FAST Ø 3.2 L16	3663165003742
FAST Ø 3.2 L18	3663165003735
FAST Ø 3.2 L20	3663165003360
FAST Ø 3.2 L22	3663165002622
FAST Ø 3.2 L24	3663165002639
FAST Ø 3.2 L26	3663165002646
FAST Ø 3.2 L28	3663165002653
FAST Ø 3.2 L30	3663165002660
FAST Ø 3.2 L32	3663165002677
FAST Ø 3.2 L34	3663165002684
FAST Ø 3.2 L36	3663165002691
FAST Ø 3.2 L38	3663165002707
FAST Ø 3.2 L40	3663165002714
FAST Ø 2.7 L42	3663165002721
FAST Ø 2.7 L44	3663165002738
FAST Ø 2.7 L46	3663165002745
FAST Ø 2.7 L48	3663165002752
FAST Ø 2.7 L50	3663165002769
FAST Ø 2.7 L52	3663165002776
FAST Ø 2.7 L54	3663165002783
FAST Ø 2.7 L56	3663165002790
FAST Ø 2.7 L58	3663165002806
FAST Ø 2.7 L60	3663165002813

FRAISES PERCUTANÉES

GS1

LIBELLÉ

3663165001144	SHANNON CORTA Ø2X8MM
3663165001151	SHANNON LARGA Ø2.2X12MM
3663165001175	SHANNON RECTA Ø2X13MM
3663165001168	SHANNON RECTA LARGA Ø2.2X20M

GS1

LIBELLÉ

3663165001182	WEDGE3 Ø2.9X13MM
3663165001199	WEDGE4 Ø4.3X13MM
3663165004954	FRAISE SHANNON RECTA X-LARGA Ø3X30M


GAMME EXTREMITIES



VIS F.A.S.T.®



VIS SÉCABLES

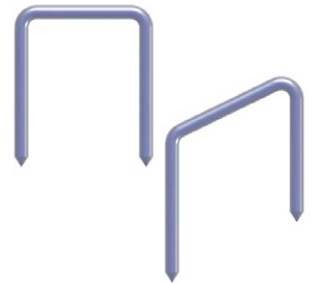

AGRAFES



FRAISES PERCUTANÉES



PLAQUES F.A.S.T.®

ACCÈS À LA NOTICE D'INSTRUCTIONS DÉMATÉRIALISÉE

SERF met à votre disposition, pour chaque type d'implant, des notices d'instructions dématérialisées spécifiques, régulièrement mises à jour, consultables, téléchargeables et imprimables au gré de vos besoins.

La notice correspondante peut vous être envoyée, sur support papier dans un délai de 7 jours calendaires, sur simple demande auprès de **SERF**.

Vous trouverez dans ces notices non seulement les informations règlementaires et les caractéristiques techniques de nos implants, mais également de précieuses informations sur les indications, contre-indications, compatibilités entre implants, les examens possibles et ceux à rigoureusement éviter, etc.

Ces notices dématérialisées, au format Adobe® Acrobat® PDF, sont accessibles et téléchargeables de deux manières :

- à partir d'un QR code figurant sur l'emballage de l'implant, pouvant être lu à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette (connexion Internet requise ; 3G/4G, Wi-Fi...) et d'une application de lecture appropriée (disponible en téléchargement gratuit sur Google Play, Apple® Appstore et Windows® Store selon modèle de périphérique employé),
- via la connexion Internet d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette, en saisissant directement sur votre navigateur Internet usuel l'adresse URL indiquée à proximité du QR code.

Voici les QR code et adresses URL des notices d'instructions dématérialisées :



FAST® VIS



<http://doc.serf.fr/0212.pdf>



VIS SÉCABLES



<http://doc.serf.fr/0211.pdf>



TOE FAST



<http://doc.serf.fr/0214.pdf>



FAST® PLAQUES



<http://doc.serf.fr/0213.pdf>



AGRAFES



<http://doc.serf.fr/0209.pdf>

Système d'exploitation requis Acrobat Reader DC

Windows

- Processeur de 1,5 GHz ou plus rapide
- Windows Server 2008 R2 (64 bits), 2012 (64 bits), 2012 R2 (64 bits)* ou 2016 (64 bits) ; Windows 7 SP1 (32 et 64 bits), Windows 8, 8.1 (32 et 64 bits)* ou Windows 10 (32 et 64 bits)
- 1 Go de mémoire RAM
- 380 Mo d'espace disponible sur le disque
- Résolution d'écran 1024x768
- Internet Explorer 11

MacOS

- Processeur Intel
- Mac OS X v10.11, macOS v10.12, macOS v10.13 ou macOS v10.14*
- 1 Go de mémoire RAM
- 380 Mo d'espace disponible sur le disque
- Résolution d'écran 1024x768
- Safari 9.0, 10.0 ou 11.0 (Le module externe pour Safari est uniquement pris en charge par les systèmes 64 bits dotés d'un processeur Intel.)

Applications mobiles

- Adobe Acrobat Reader : iOS, Android, Windows Phone
- Adobe Scan : iOS, Android
- Adobe Fill & Sign : iOS, Android

Tous les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont marqués CE selon la Directive 93/42/CEE et ses amendements, à moins qu'identifiés spécifiquement comme «non marqués CE». Les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont des dispositifs de classe IIb et IIa. Les dispositifs médicaux de classe IIb et IIa sont marqués CE 0459 avec le GMED. Avant toute utilisation d'un produit SERF, veuillez vous référer à la notice d'instructions et à la technique opératoire. Consulter les étiquettes et notices produits pour la liste complète des indications, contre-indications, risque, avertissement, précautions et mode d'emploi.
©2023 SERF. Tous droits réservés. F.A.S.T.® est une marque de commerce de SERF.

DISTRIBUÉ PAR

CE 0459



85 avenue des Bruyères, 69150 Décines-Charpieu - FRANCE / Tel. +33 (0)4 72 05 60 10 - Fax +33 (0)4 72 02 19 18 / serf@serf.fr



v.serf